

MEDEL²

Istruzioni

Presentazione del Caso Clinico

Prima schermata con i dati conosciuti del paziente

La percentuale di salute aumenterà a seguito di scelte corrette, l'obiettivo è di arrivare più vicini possibile al 100%

In qualsiasi schermata è possibile avere istruzioni sulla navigazione premendo questo tasto

Selezionare «AVVIA» per iniziare il Caso Clinico

Caso pronto per l'avvio

PRESENTAZIONE

Nome Paziente
Mirco

Età
34 anni

Il problema
Mirco, 34 anni, si presenta dal proprio medico di base preoccupato per una tumefazione sulla parte destra del collo, ben visibile e non dolente spontaneamente, né dolorabile alla palpazione.
È portatore del virus dell'immunodeficienza (HIV), da oltre 15 anni ed è in terapia con antiretrovirali. La carica virale misurata da pochi giorni è di < 20 copie/ml e i linfociti T CD4 + sono 650 /ml³.
È sessualmente attivo con uomini e fa uso di condom nei rapporti anali ma non in quelli orali. Ha un nuovo partner da un mese.
Non riferisce febbre, sudorazioni, odinofagia ma nota una congestione nasale da qualche settimana resistente a terapie topiche e generali (nafazolina spray e ceterizina).
Segnala di aver perso quasi 3 kg di peso nelle ultime quattro settimane attribuito all'inizio di un'attività fisica regolare (ha iniziato a frequentare una palestra) e ribadisce di non avere né dispnea allo sforzo né astenia.

MedelPro - Tumefazione laterocervicale

AVVIA ►

Il percorso del Caso Clinico

Dopo l'avvio sarà visualizzato tutto il percorso previsto dal Caso Clinico

Selezionare la prima voce disponibile dal menu del percorso del Caso Clinico

IL PERCORSO DEL CASO CLINICO
Puoi consultare questa pagina in ogni momento durante lo svolgimento del caso cliccando sul tasto "PERCORSO" posto in basso a sinistra.

MEDEL²
CHIUDI ✕

☒ Anamnesi patologica remota

☐ Anamnesi sociale

☐ Anamnesi farmacologica

☐ Anamnesi allergica

☐ Anamnesi familiare

☐ Decorso clinico

☐ Domanda 2

☐ Approfondimento

☐ La biopsia linfonodale

☐ Test di laboratorio

☐ Domanda 3

☐ Approfondimento

☐ Sintesi diagnostica

☐ Cosa dovremmo fare?

☐ Esame Obiettivo

☐ Domanda 1

☐ Approfondimento


☐ Il paziente presenta i seguenti Esami di laboratorio

☐ Ecografia del linfonodo del Paziente

CASO CLINICO: MedelPro - Tumefazione laterocervicale

Caso Clinico – interfaccia di navigazione

Titolo ed eventuale sottotitolo della voce di menu che stiamo navigando

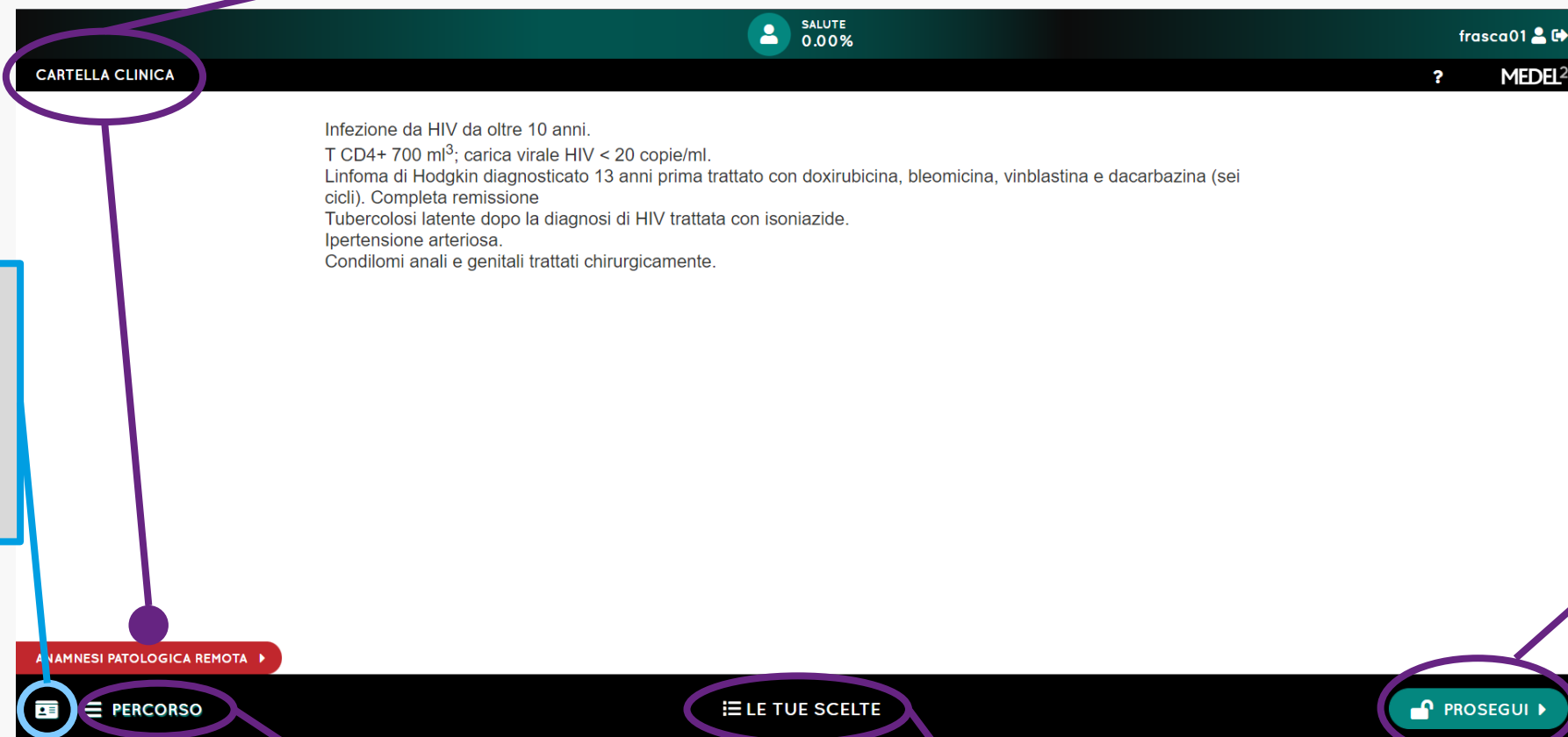

In qualsiasi momento è possibile tornare alla Presentazione del Caso Clinico tramite questo pulsante


È possibile tornare al percorso del Caso Clinico tramite questo pulsante

È possibile rivedere le scelte effettuate tramite questo pulsante

Selezionare «PROSEGUI» per avanzare nel Caso Clinico

Caso Clinico – Esame Obiettivo

È possibile visitare il paziente, cliccando nell'area azzurra della zona interessata oppure una delle icone esterne, il software farà comparire una finestra di popup con il relativo feedback

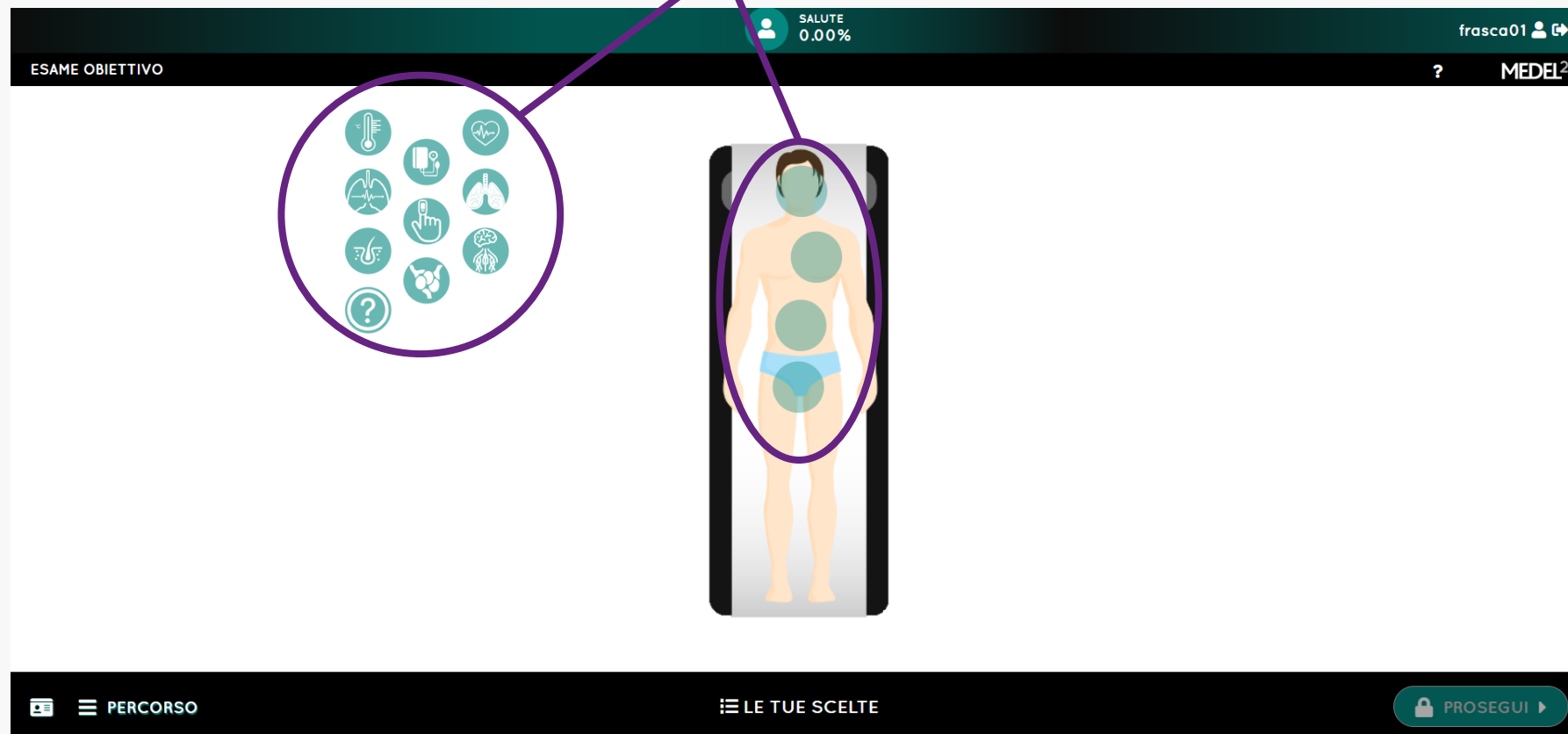

Caso Clinico – Rispondere ad una domanda

Testo della domanda

DOMANDA 1

SALUTE
0.00%

frasca01

MEDEL²

Quale fra le seguenti patologie causa più di frequente una tumefazione come descritta nel collo?
(indica tre risposte)



RIFERIMENTO	RISPOSTA
☐ Infezione da Bartonella henselae	
☐ Infezione da HIV	
☐ Linfoma	
☐ Cancro Orofaringeo	
☐ Infezione riattivata da Toxoplasma gondii	
☐ Linfadenite tuberculare	

PERCORSO

LE TUE SCELTE

CONFERMA SCELTA

PROSEGUI

Selezionare la/le risposta/e scelta/e e premere su «CONFERMA SCELTA» per inviare le risposte al server

N.B. Una volta confermata una scelta NON sarà più possibile effettuare modifiche

Caso Clinico - Conclusione

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing a blue oval icon, a hamburger menu, and links for Home, Corsi, and Assistenza. A user profile icon is in the top right. Below the navigation bar, the text 'Apri attività' is on the left, and a button labeled 'Esci dall'attività' is on the right. A dark green bar below this contains the word 'CONSEGNA' on the left and 'BLOCK NOTES ? MEDEL²' on the right. The main content area displays the message: 'Il caso è concluso. Clicca su "Esci dall'attività" per tornare al corso.' A purple line originates from a text box at the bottom and points to the 'Esci dall'attività' button.

Al termine premere il tasto «Esci dall'attività» per chiudere il Caso Clinico e tornare al corso

PERCORSO LE TUE SCELTE PROSEGUI ►